

Dampfinhalator

mit Wick VapoPads®

Empfohlen von*



W1300-DE



Abb. A



Abb. B



Abb. C


DE

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Wick-Dampfinhalators. Ihr neuer Inhalator bietet alle Vorteile einer Dampfbehandlung – zu Hause, am Arbeitsplatz oder auf Reisen.

- Wohltuende Mentholdämpfe
- Tragbar – überall einsetzbar
- Füllen Sie einfach heißes Leitungswasser ein, setzen Sie ein Duft-Pad ein und genießen Sie den wohltuenden Dampf
- Spülmaschinenfest – wieder verwendbar
- Im Lieferumfang sind 2 Wick VapoPads® (Duft-Pads) enthalten

Komponenten


1. Deckel 2. Mittelteil 3. Sockel

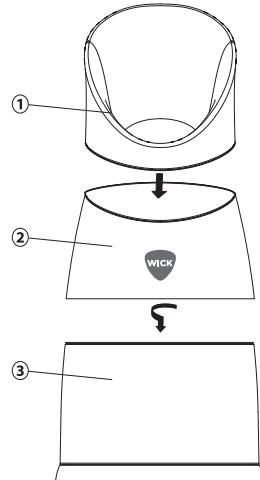

Gebrauchsanleitung

Spülen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch gründlich aus.

1. Nehmen Sie den Deckel des Geräts vom Sockel ab, indem Sie ihn hin und her drehen und abziehen.
2. Füllen Sie den Sockel mit heißem (nicht kochendem) Leitungswasser bis zur Linie, die den maximal zulässigen Wasserstand kennzeichnet. (Siehe Abb. A)
HINWEIS: Bei Befüllung über diese Linie hinaus, kann heißes Wasser auslaufen.
3. Öffnen Sie ein Wick VapoPad®-Duft-Pad-Päckchen und geben Sie den Inhalt ins Wasser. Bringen Sie den Deckel wieder an.
ACHTUNG: Das Gerät enthält heißes Wasser. Um zu vermeiden, dass nach dem Auffüllen des Geräts heißes Wasser ausläuft, achten Sie darauf, dass der Gehäusedeckel richtig einrastet und fest sitzt.
4. Atmen Sie die Wick-Dämpfe ein. (Siehe Abb. B)

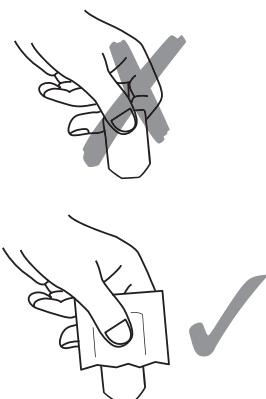



Empfohlen von*

Pflege und Reinigung

Reinigen und trocknen Sie den Inhalator gründlich nach jedem Gebrauch.
Das Gerät darf in der obersten Schublade einer Geschirrspülmaschine gereinigt werden. (Siehe Abb. C)

Mit Wick VapoPads® (Duft-Pads) verwenden

Ihr Inhalator ist zur Verwendung mit Wick VapoPads® Menthol oder Rosmarin&Lavendel bestimmt.



WARNUNG:

Pad kann zu Erstickungsgefahr führen. Für Kinder und Haustiere unzügänglich aufzubewahren.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar (H226).
Verursacht Hautreizungen (H317).
Kann allergische Hautreaktionen verursachen (H319).
Verursacht schwere Augenreizung (H319).
Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung (P102).
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen (P102).
Von Hitze/ Funken/ offener Flamme/ heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen (P210).
Freisetzung in die Umwelt vermeiden (P273).

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasse ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen (P305+P351+P338).
Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen (P333+P313).

Nicht bei Säuglingen mit einem Alter unter 36 Monaten (WH7)/mit einem Alter unter 3 Monaten oder einem Gewicht unter 4,5 kg (WBR7) verwenden. Gebrauchsanweisung für Hinweise zur Höchstmenge und zur maximalen Anwendungsdauer der Pads pro 24-stündigem Zeitraum beachten.
WH7 enthält: Menthol, Eukalyptusöl, Rosmarinöl, Lavendelöl.
WBR7 enthält: Eukalyptusöl, Rosmarinöl, Lavendelöl.



Nur mit Wick VapoPads®
Rosmarin&Lavendel (WBR7) oder
Menthol (WH7) verwenden



W1300-DE



C abrat



B abrat



A abrat

HU

Gratuitálunk az újonnán vásárolt Wick's gózinhálatról. Az Ón új inhalátora biztosítja Ónnék a gözterápia minden előnyét otthonról, a munkahelyen vagy utazáskor.

- Nyugtató hatású, mentolos vagy rozmaringos-levendulás gózok
- Hordozható - bárhon használhatja
- Egyszerűen töltse fel méleg csapívzzel, adja hozzá az illatpárnát, és lelegezzen.
- Mosogatógépben mosható - újra felhasználható
- 2 Wick VapoPads® illatpánat tartalmaz

ALKATRÉSZEK

1. Felső rész 2. Középső rész 3. Alsó rész



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Első használattal előző alapban előírta ki a berendezést.

1. Ellentétes irányba csavarva a két részt és a felső részt leemelve válassza le a felső részt az alsó részről.
2. Töltsé fel az alsó részt a jelöltsg meg (nem forró) csapívzzel. (Lásd az A ábrát a)
MELEGÍTÉS: Ha tültött, a berendezés szíválogni fog.
3. Nyissa fel a Wick VapoPad® illatpána csomagot, és adja a vízhez. Tegye vissza a felső részt.
VIGÁZAT: A termék még vizet tartalmaz. Hogy a felültől után ellenőrje a méleg víz kifürcsenését,
4. Lelegezze be a nyugtató hatású gózoket (Lásd a B ábrát a).

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Minden egyes használat után alaposan mossa el és szárítsa meg inhalátort.
Az eszközöt a mosogatógép legfelső polcán is el lehet mosni. (Lásd a C ábrát a)

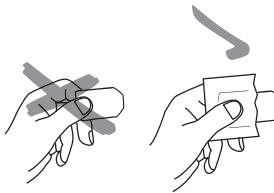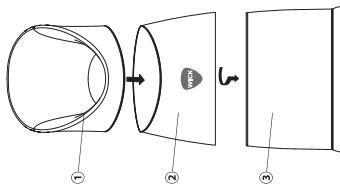

Gewährleistung

Für den Wick-Dampfinhalator gilt eine Gewährleistung gegen Material- und Verarbeitungsfehler für zwei Jahre ab Kaufdatum.
Ein defektes Teil wird kostenlos ausgetauscht, wenn es nicht unbefugt verändert wurde und das Gerät gemäß der schriftlichen Gebrauchsanleitung verwendet wurde.

GŐZ-Inhalátor Wick VapoPads® párnákkal

WICK VAPOPADS® PÁRNÁKKAL HASZNÁLJA

Az inhalátor Wick mentol vagy rozmarining és levendula VapoPads® illatpárnákkal használatos.



FIGYELMEZTETÉS:

A párna fulladásveszélyt jelenthet. Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó.

Tűzveszélyes folyadék és gőz (H226).

Bőrirritáló hatású (H315).

Allergiás bőrreakciót válthat ki (H317).

Súlyos szemirritációt okoz (H319).

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz (H411).

Gyermekektől elzárva tartandó (P102).

Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás (P210).

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását (P273).

HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel (P302+P352).

SZEMBE KERÜLÉS esetén: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék

eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása (P305+P351+P338).

Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni (P333+P313).

36 hónaposnál fiatalabb csecsemőknél (WH7) / 3 hónaposnál fiatalabb vagy 4,5 kg-nál kisebb testsúlyú csecsemőknél (WBR7) tilos használni! Az illatosító párnák 24 óra alatt használható mennyiségre és a használatuk időtartamára vonatkozó határértékeket lásd a használati útmutatóban.

A WH7 illatpárna összetevői: mentol, eukaliptuszolaj, cédruslevélolaj.

A WBR7 illatpárna összetevői: eukaliptuszolaj, rozmariningolaj, levendulaolaj.

Garancia

A Kaz 2 év garanciát vállal a termékre, a garanciális időszak a vásárlás napján kezdődik. minden hibás alkatrész, külön díj felszámítása nélkül, kicserélünk, ha az eszközt nem alakították át, és a nyomtatott utasításoknak megfelelően használták.

* Ajánlja



This product is manufactured by Kaz Europe Sàrl under license from The Procter & Gamble Company. Wick and other associated trademarks are owned by The Procter & Gamble Company.

© 2015, Kaz Europe Sàrl

 Kaz Europe Sàrl
Place Chauderon 18
CH-1003 Lausanne - Switzerland

www.hot-europe.com


Made and printed
in China

P/N: 31IM1300297
02JUN15